

AED

自動体外式除細動器



自動体外式除細動器

AED-2150シリーズ カルジオライフ

商品コード：AED-2150

AED日常点検タグを
よく見える所に!

忘れないで日常点検!



AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインシテータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。製造販売業者または販売業者が、設置者の保守管理の手間を軽減する独自のサービスをご用意しております。お客様のご都合に合わせて、これらを利用し、いつでもAEDが使える状態にしておいてください。



made in Japan

ガイドライン
2010 対応



成人・小児モード
切替スイッチ



パッド使用期限
確認



100回/分の
動作音



イラスト表示



心電図波形表示



AEDモード



セミオートモード



防塵・防水
(IP55)



Bluetooth
通信



AED Linkage



**GOOD
DESIGN**




AED-2150シリーズは
耳が不自由な方にも
お使いいただけます。

エレクトロニクスで病魔に挑戦

 **NIHON KOHDEN**

いつでも迅速に、簡単確実な操作を 日本光電のAED

日本光電のAEDは、唯一の国産AEDです(2015年7月現在)。
AEDの設置後、いざという時にいつでも使用することができるよう、さまざまな機能、サービスをご用意しています。
大切な命を守るために必要不可欠な保守管理についても、国産メーカーの強みを活かし、きめ細かなサポートをご提供します。

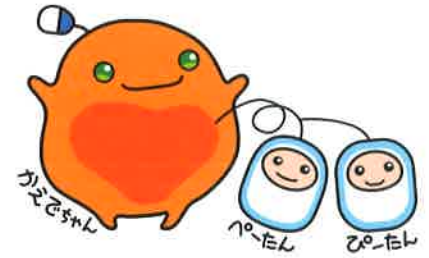

かえでちゃん (CAEDE: CPR AED Expert) は、心肺蘇生とAEDの普及をお手伝いするキャラクターです。

POINT 1

簡単3ステップ操作

- Step1 フタを開けると自動電源ON
- Step2 パッドを胸に貼る
- Step3 ボタンを押して電気ショック



POINT 2

充実のセルフテスト

◆ セルフテスト項目

- 毎日: バッテリ、パッド、内部電子回路、ショックボタン、ソフトウェア
- 毎月: バッテリ(負荷状態)、パッド、内部電子回路、高電圧回路(最大エネルギーでの充電)、ショックボタン、ソフトウェア/LCD

POINT 3

分かりやすいステータスインジケータ

毎日のセルフテストの結果を一目で確認可能



AEDリモート監視システム ARM-1000をご利用いただけます

いつでも確実にAEDを使用するために、日々のセルフテスト結果の確認や、パッド、バッテリーなど消耗品の適切な交換といった日常点検を行うことが重要です。AED Linkageは、AEDの状態を集中管理し、お客様ご自身による日常点検をサポートします。

- Web上でAED本体の状態、電極パッドの使用期限、バッテリーの残量および廃棄期限等を確認できます。
- AEDにトラブルがあった場合や、電極パッドやバッテリーの使用期限前に、ご登録いただいたメールアドレスに情報をお届けします。

- ※ AEDの日常点検は、AED本体のステータスインジケータを見て行ってください。
- ※ 設置位置、電波状況等により、AEDの情報を受信できない場合があります。
- ※ 詳しくは当社営業員にお問合せください。

